

efemia

EFEMIA PESSAR PODPIERAJĄCY

Efemia to pessar podpierający wprowadzany do pochwy w celu redukcji nietrzymania moczu spowodowanego wysiłkowym nietrzymaniem moczu

PESSAR EFEMIA


Koncepcja i konstrukcja pessara Efemia opiera się na teorii integralności, tej samej teorii naukowej, co najpopularniejsze chirurgiczne metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu jak taśmy TVT. Efemia została zaprojektowana tak, aby podierać cewkę moczową przez ścianę pochwy za pomocą dwóch pierścieni podpierających.

Pierścienie wspierają "kolano cewki moczowej" znajdujące się w środkowej części cewki moczowej, gdy cewka moczowa i szyja pęcherza opadają przy podwyższonym ciśnieniu w jamie brzusznej. Dwa pierścienie podpierające mają taką samą odległość między sobą jak szerokość taśmy TVT. Długość uchwytu podpierającego pęcherz moczowy została zaprojektowana w taki sposób, aby pierścienie podpierające były w tej samej pozycji co taśma TVT. Uchwyt utrzymuje urządzenie we właściwej pozycji, zapobiegając jego zbyt niemu wsunięciu do pochwy. Kształt pierścieni zapewnia, że urządzenie jest zawsze skuteczne, niezależnie od kierunku, w którym skierowany jest uchwyt, minimalizując w ten sposób błędy użytkownika.


Efemia jest pessarem wielokrotnego użytku i można go używać do 16 godzin dziennie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Czyścić wodą z mydłem, można także wygotować.

BADANIA KLINICZNE

Bezpieczeństwo i skuteczność pessara podpierającego Efemia zostały potwierdzone w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym, obejmującym 97 kobiet w 4 klinikach w Szwecji. Badanie potwierdziło, że pessar Efemia osiągnął swój główny cel w postaci zmniejszenia epizodów nietrzymania moczu (mediana redukcji podczas testów prowokacyjnych 77%). Zaobserwowane skutki uboczne były łagodne i przemijające. W związku z tym analizując korzyści i ryzyka pessara Efemia można stwierdzić, że ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i ich nasilenie są akceptowalne w stosunku do korzyści, jakie użytkowniczka odnosi z działania pessara podpierającego Efemia.

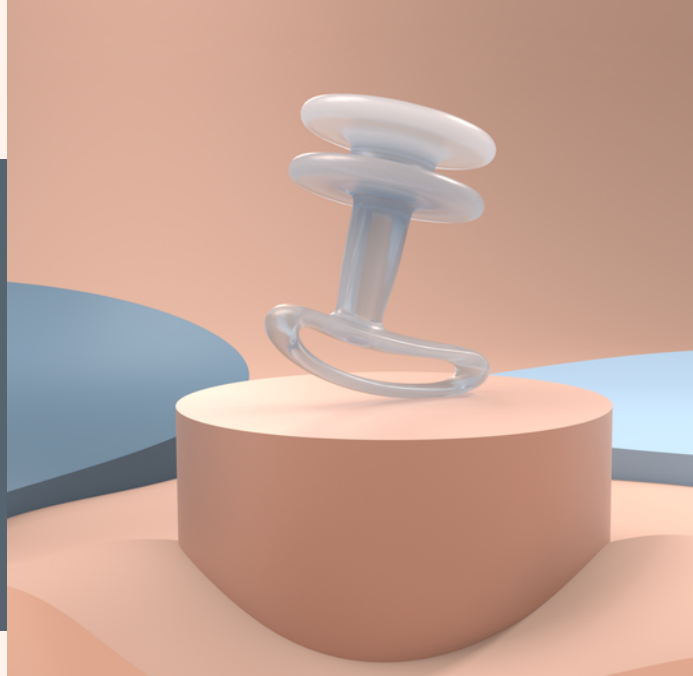

efemia

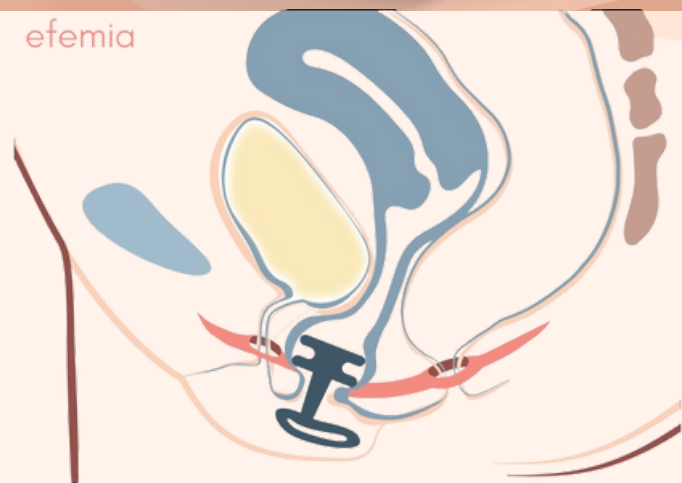

SKUTECZNY

3 na 4 kobiety potwierdzają zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu




BEZ SKUTKÓW UBOCZNYCH

zasada działania taśmy TVT, ale bez skutków ubocznych




WYGODNY

łatwy do założenia i wyjęcia podobnie jak tampon; 3 rozmiary

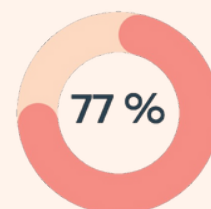

Mediana redukcji podczas testów prowokacyjnych

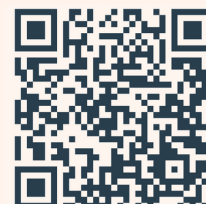

Zapoznaj się z badaniem tutaj!

BADANIA RYNKOWE


Akceptacja przez użytkowniczki pessara podpierającego Efemia została oceniona zarówno w starszych (średni wiek 55 lat) i młodszych (średni wiek 36 lat) grupach wiekowych, podczas codziennego życia i podczas ćwiczeń takich jak podnoszenie ciężarów, cross-fit i bieganie. Badania wykazały wysoką akceptację użytkowniczek. Średnio 72% ze 130 uczestniczek badania zgłosiło, że prawdopodobnie będą kontynuować używanie Efemia (mediana oceny w skali 0-10 wyniosła 8).



7/10 deklaruje, że nadal będzie używać Efemia



8/10 deklaruje, że poleci Efemia koleżance

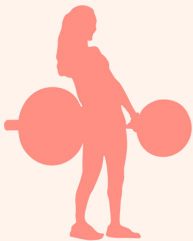


86% użytkowniczek badania było skłonnych kontynuować korzystanie z pessara EFEMIA podczas uprawiania crossfitu i podnoszenia ciężarów



Dystans biegu nie miał wpływu na doświadczenia użytkowniczek pessara EFEMIA



68% użytkowniczek potwierdziło, że pessar EFEMIA ułatwił im jazdę konną

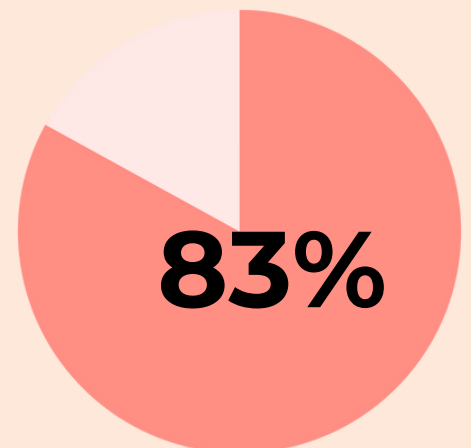


kobiet potwierdziło, że EFEMIA ułatwiła im codzienne życie


*TVS3000

ROZMIARY

Efemia pessar podpierający jest dostępny w trzech różnych rozmiarach: 30 mm, 35 mm i 40 mm. Rozpoczyna się od przepisania zestawu startowego, zawierającego wszystkie trzy rozmiary, a kobieta może wypróbować je samodzielnie w domu podczas aktywności, gdy doświadcza nietrzymania moczu. Gdy znajdzie odpowiedni dla siebie rozmiar, przepisuje się jej jeden rozmiar co trzy miesiące.

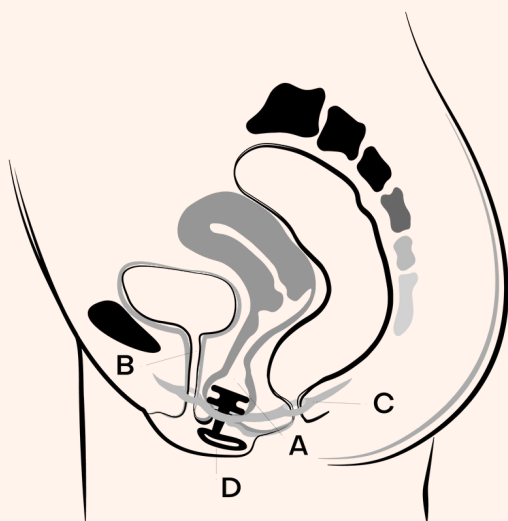

a. Pochwa
b. Cewka moczowa
c. Dno miednicy
d. Efemia pessar

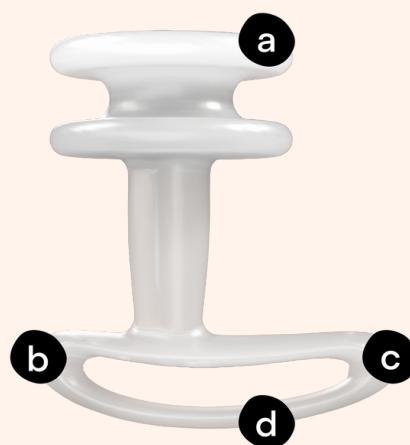

a. Pierścienie podpierające
b. Przód
c. Tył
d. Uchwyt



Efemia pessar podpierający jest wyrobem medycznym klasy IIb


MATERIAŁ

- 100% czystego silikonu klasy medycznej
- Miękki i elastyczny, ale wystarczająco stabilny, aby wspierać cewkę moczową w okresach zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej
- Materiał jest trwały i sprężysty, dzięki czemu może wytrzymać środowisko pochwy
- Nie zawiera metali ciężkich, środków trudnopalnych, ftalanów, bisfenoli, związków fluorowych, PFAS, barwników, substancji antybakteryjnych, lateksu ani białek zwierzęcych
- Materiał został przetestowany pod kątem biokompatybilności i jest zgodny z normami dotyczącymi wyrobów medycznych, ISO 10993-1:2018 i USP klasy IV




PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Produkcja jednej pessara Efemia odpowiada dziennemu zużyciu jednorazowym podpaskom na nietrzymanie moczu (średnio 4 podpaski) pod względem śladu węglowego. Przejście z podpasek na pessar Efemia pozwala zredukować średnio 46 kg CO₂ rocznie i zmniejszyć ilość odpadów domowych nawet o 29 kg rocznie.

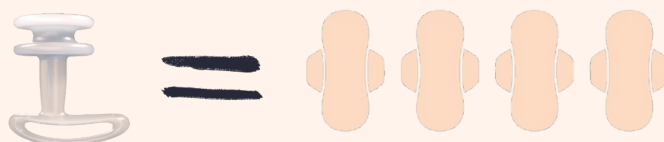

PORÓWNANIE EFEMIA I JEDNORAZOWYCH TAMPONÓW PODPIERAJĄCYCH I STABILIZATORÓW PĘCHERZA

Mimo, że początkowy koszt pessara Efemia jest wyższy niż dwóch jednorazowych produktów na poniższym wykresie, Efemia jest bardziej ekonomiczną alternatywą już po ok. pół miesiąca do jednego miesiąca. W ciągu roku pacjentka może zaoszczędzić od 2800 do 4400 PLN.

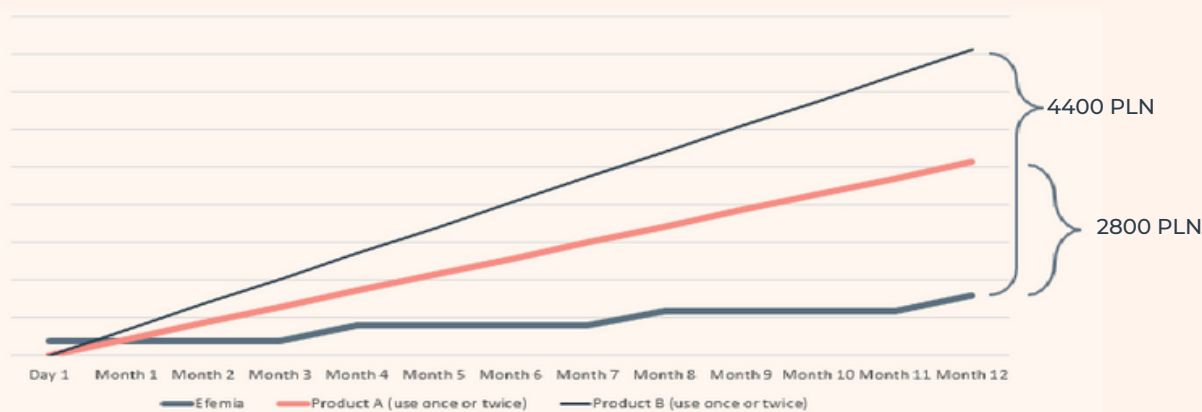

*zg z cenami z lutego 2024

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy występują jakieś skutki uboczne?

Jeśli pacjentka cierpi na suchość pochwy, pessar Efemia może powodować podrażnienia lub otarcia warg sromowych lub wewnątrz pochwy. Jeśli pacjentka odczuwa otarcia lub jeśli wie, że ma wrażliwy srom, może spróbować zastosować lubrykant na bazie wody.

Czy pessar Efemia może być stosowany przy założonej wkładce wewnątrzmacicznej?

Tak.

Jak często i jak długo można stosować pessar Efemia?

Pessar Efemia może być używany tyle razy, ile jest to konieczne, do 16 godzin dziennie w ciągu 3-miesięcznego okresu użytkowania produktu.

Skąd mam wiedzieć, jakiego rozmiaru należy użyć?

Najlepiej po prostu przetestować i zobaczyć, jaki rozmiar jest najbardziej odpowiedni, zaczynając od najmniejszego rozmiaru. Jeśli dany rozmiar nie zmniejsza lub nie zatrzymuje epizodów nietrzymania moczu lub pacjentka nie czuje się komfortowo, należy zalecić większy rozmiar. Nawet jeśli najmniejszy rozmiar jest odpowiedni, warto wypróbować większy rozmiar dla porównania. Mniejszy nie zawsze oznacza wygodniejszy.